

เครื่องขับสารเหล็ก INFUSA TS

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและสัญญาณเตือน

เครื่องขับสารเหล็ก INFUSA มีระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งสัญญาณเตือนอันตรายและวงจรตัดการทำงานให้ความปลอดภัยสูงสุด และเชื่อถือได้ไว้วางใจได้

1. สายยางรัดตัวกระบอกฉีดยาและปีกกระบอกฉีดยาที่มีร่องบังคับด้วยลวดสปริง เพื่อให้กระบอกฉีดยาวางอยู่คงที่หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวได้

2. ลวดสปริงยึดปลายเหล็กเลี่ยงการเคลื่อนที่ของก้านสูบ (piston)

3. กล่องพลาสติกป้องกันเครื่องชำรุด


4. การป้องกันการใช้แบตเตอรี่กลับหัว เครื่องจะไม่ทำงาน เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ ตรวจสอบตำแหน่งการวางให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ถ้าเครื่องยังไม่ทำงานให้เปลี่ยนก้อนใหม่ (ดูส่วนที่ 5) ถ้ายังไม่ทำงานอีกให้รีบส่งเครื่องมายังศูนย์ของบริษัทฯ ตัวแทน โทร.0-2320-1232-5

5. สัญญาณเตือนเป็นช่วงๆ และสัญญาณไฟกระพริบ เมื่อเครื่องผิดพลาดของวงจรไฟฟ้าเครื่องจะยุติการทำงานอัตโนมัติ และไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เพราะเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทุกครั้งที่มีการทำงานอีก ให้รีบส่งเครื่องมายังศูนย์บริการบริษัทฯ โทร.0-2320-1232-5

6. สัญญาณเตือนเป็นช่วงๆ และสัญญาณไฟกระพริบเมื่อเครื่องใช้น้ำยาหมดลง เครื่องจะยุติการทำงานอัตโนมัติ สัญญาณเตือนนี้จะเกิดเมื่อน้ำยาหมดลงและกระบอกฉีดยาว่างเปล่า ให้เลื่อนสวิตช์ 0 ปิดเครื่อง ถอดสายให้น้ำยาและกระบอกฉีดยาทิ้งไป ใส่กระบอกฉีดยาและสายและเริ่มระบบการปฏิบัติต่อไป

7. สัญญาณเตือนเป็นช่วงๆ และสัญญาณไฟกระพริบเมื่อสายให้น้ำยาเกิดการอุดตันหรือขดงอการให้น้ำยาไม่สะดวก

8. สัญญาณเตือนกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำด้วยเสียงและแสง เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อนกำลังลงจะมีเสียงสัญญาณเตือนแต่ช่วงของมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนน้ำยา เครื่องจะยังคงปฏิบัติงานการให้น้ำยาต่อไปหลังจากการเตือนครั้งแรกแต่สัญญาณเตือนก็ยังอยู่ ขณะที่มอเตอร์ยังเคลื่อนที่ขับเคลื่อนน้ำยา ดังนั้นแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด แต่ถ้าให้แบตเตอรี่หมดแล้วเครื่องจะหยุดทำงานทันทีต้องเปลี่ยนใหม่

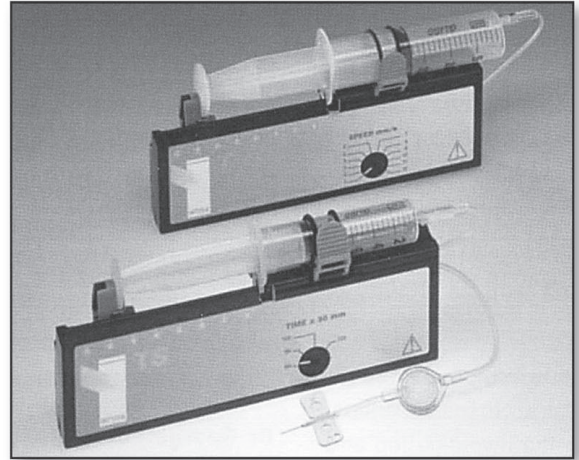

9. มีสัญญาณการตรวจสอบระบบ มีระบบการตรวจสอบวงจรการทำงานเครื่องเมื่อเริ่มการใช้งานครั้งแรกมีเสียงและไฟแดงให้เห็น ถ้าปรากฏวงจรบกพร่องเครื่องจะไม่ทำงาน

10. จะมีแสงไฟกระพริบขณะเครื่องปฏิบัติงาน

คำแนะนำบางข้อที่ให้ประโยชน์ในการใช้งาน

1. เครื่องขับสารเหล็ก INFUSA เป็นเครื่องที่ให้ความไว้วางใจและแข็งแรงทนทานออกแบบเพื่อการใช้งานยาวนานไร้กังวลเพียงให้เอาใจใส่เล็กน้อยเท่านั้น

2. ห้ามตกน้ำหรือโดนของเหลวถ้าเหตุเกิดขึ้นให้รีบเช็ดออกด้วยผ้านุ่ม

3. กระบอกฉีดยาต้องทำความสะอาดให้แห้งก่อนจะประกอบเข้ากับเครื่อง

4. ตรวจสอบสายให้น้ำยาติดกับกระบอกฉีดยาเรียบร้อยหรือไม่

5. ควรให้เครื่องหายใจบนกระบอกฉีดยาอยู่ด้านล่างขณะเครื่องปฏิบัติงาน

6. ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มหลังจบสิ้นการใช้งาน

7. ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานกับเครื่องและเก็บเครื่องไว้ในกล่องพลาสติก

8. ทำความสะอาดเกลียวสกรูทุกครั้งด้วยแปรงถูฟัน (เก่า) แปรงเบาๆ

9. ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นเด็ดขาด

10. กรณีการชำรุดเกิดจากความบกพร่องจากการใช้ ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย โทร.0-2320-1232-5